



ANWENDUNGSHINWEISE

**ILUMETRI® 100 mg/1 ml
Injektionslösung im Fertigpen**

SCHRITT 1: VORBEREITUNGEN

1A. Nehmen Sie die Verpackung mit dem Fertigpen aus dem Kühlschrank.

- Den Fertigpen aus dem Karton nehmen, um ihn zu erwärmen.



- Die Verpackung oder den Fertigpen **NICHT** schütteln.
- Erwärmen Sie den Fertigpen **NICHT** auf eine andere Weise, z. B. mit heißem Wasser, in der Mikrowelle oder mit direkter Sonneneinstrahlung.

1B. Während Sie warten, bis das Arzneimittel Raumtemperatur angenommen hat, stellen Sie alle zusätzlichen Materialien zusammen, die Sie benötigen.

- Alkoholtupfer
- Wattebausch oder Mulltupfer
- Pflaster
- Entsorgungsbehälter für spitze Gegenstände. Sofern dieser nicht vorhanden ist, fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist.



1C. Überprüfen Sie die Informationen auf dem Etikett, um sicherzustellen, dass das Verfallsdatum noch nicht abgelaufen ist sowie das Sichtfenster, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit klar oder leicht gelblich ist und keine Partikel oder Verfärbungen aufweist.

Es können eine oder mehrere Luftblasen vorhanden sein, das ist völlig normal.


- NICHT** verwenden, wenn das Verfalldatum überschritten ist.
- NICHT** verwenden, wenn die Flüssigkeit trübe oder verfärbt ist oder Partikel enthält.

1D. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie anschließend ab.



1E. Wählen Sie eine Injektionsstelle.

Empfohlene Injektionsstellen sind:

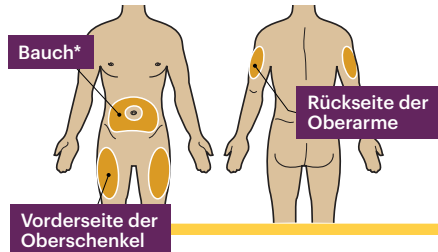

*Ausnahme von fünf Zentimetern um den Bauchnabel herum.


- NICHT** in empfindliche, gerötete, verletzte oder von Psoriasis betroffene Haut injizieren.

1F. Reinigen Sie die Injektionsstelle.

- Reinigen Sie die gewählte Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
- Lassen Sie die Haut an der Luft trocknen.
- Pusteln oder berühren Sie die Stelle **NICHT**, nachdem sie gereinigt wurde.


SCHRITT 2: INJEKTION

2A. Entfernen Sie die graue Nadelschutzkappe vom Fertipen.

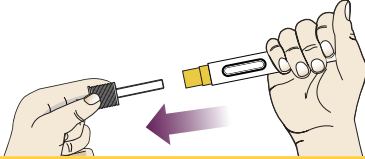

- Berühren Sie den gelben Nadelschutz **NICHT** mit Ihren Händen.
- Setzen Sie die graue Nadelkappe **NICHT** zurück auf den Pen.
- Die Kappe **NICHT** verdrehen oder verbiegen, da dies die Nadel beschädigt.

2B. Positionierung des gefüllten Fertipens:

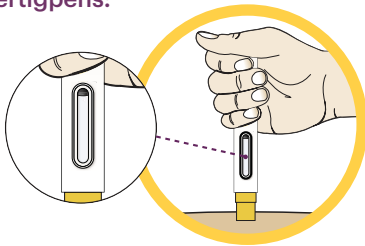

- Halten Sie den Pen so, dass Sie das Sichtfenster sehen können.
- Spannen Sie die Haut und setzen Sie den Fertipen in einem 90-Grad-Winkel gerade mit dem gelben Nadelschutz auf die gereinigte Injektionsstelle.


2C. Durchführung der Injektion:

Drücken Sie den Fertipen gegen die Haut. Sie sehen, wie der gelbe Nadelschutz nach oben in den Pen gleitet.

- Sie hören den ersten Klick, der Sie darüber informiert, dass die Injektion begonnen hat.
- Zählen Sie langsam bis 15. Während dieser Zeit hören Sie ein zweites Klicken, womit Sie wissen, dass die Injektion abgeschlossen ist.



- **Prüfen Sie das Sichtfenster.** Es sollte vollständig gelb gefärbt sein.
- Heben Sie den Fertipen jetzt gerade nach oben.

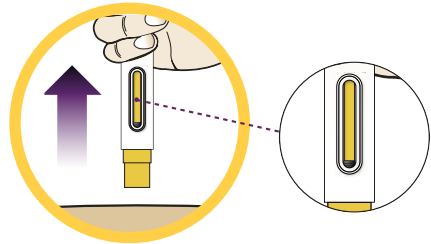

- Stellen Sie sicher, dass Sie die vollen fünfzehn Sekunden warten und das zweite Klicken zu hören ist. Ansonsten ist die Injektion nicht vollständig durchgeführt worden.
- Entsorgen Sie den Fertipen sofort in einem Entsorgungsbehälter für spitze Gegenstände. Wenn Sie keinen Behälter für spitze Gegenstände haben, befolgen Sie Ihre lokalen Entsorgungsrichtlinien.

SCHRITT 3: ENTSORGUNG


3A. Entsorgen Sie den Pen wenn möglich in einem Entsorgungsbehälter und kümmern Sie sich um die Injektionsstelle.

Wenn eine Blutung auftritt, drücken Sie den Wattebausch oder den Mulltupfer auf die Hautstelle. Legen Sie nach Bedarf einen Pflasterverband an.


- Entsorgen Sie den gebrauchten Pen **NICHT** im Hausmüll. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden.
- Reiben Sie **NICHT** an der Injektionsstelle.

BESCHREIBUNG DES FERTIGPENS

VOR GEBRAUCH

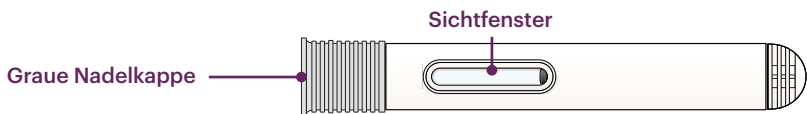

NACH GEBRAUCH

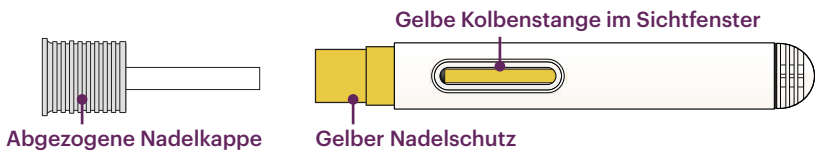

- **NICHT** verwenden, wenn die graue Kappe fehlt oder beschädigt ist.
- **NICHT** verwenden, wenn die gelbe Kolbenstange im Fenster sichtbar ist.

ILUMETRI® 100 MG/1 ML INJEKTIONS LÖSUNG IM FERTIGPEN ANWENDUNGSHINWEISE

Ihnen wurde ILUMETRI® verschrieben, es wird zur Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen angewendet.

Lesen Sie bitte vor der Verabreichung der Injektion die Gebrauchsanweisung. Mit etwas Übung können Sie sich die Injektion zu Hause verabreichen. Sprechen Sie jedoch mit Ihrem Arzt, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Ihr Arzt sollte Ihnen erklären, wie der Fertigpen anzuwenden ist, und Sie sollten die Gebrauchsanweisung in der Packung vollständig lesen.



LAGERUNG

- Bewahren Sie die Packung im Kühlschrank bei 2–8° C auf.
- Sie darf **NIE** eingefroren werden.
- Das Produkt sollte in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



WARNHINWEISE


ILUMETRI® (Tildrakizumab) ist zur subkutanen Anwendung (Anwendung unter der Haut) vorgesehen.

- Teilen Sie den ILUMETRI® Fertigpen **NICHT** mit anderen Personen.
- Entfernen Sie die graue Nadelkappe erst, wenn Sie die Injektion durchführen möchten.
- Berühren Sie **NICHT** den gelben Nadelschutz mit Ihren Händen.
- Bewahren Sie das Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Im Falle einer unerwünschten Reaktion wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.



Eine Video-Anleitung zur Selbstinjektion von ILUMETRI® können Sie sich unter diesem QR-Code oder alternativ unter www.almirall.de/ilumetri-patientenvideo-applikation ansehen.

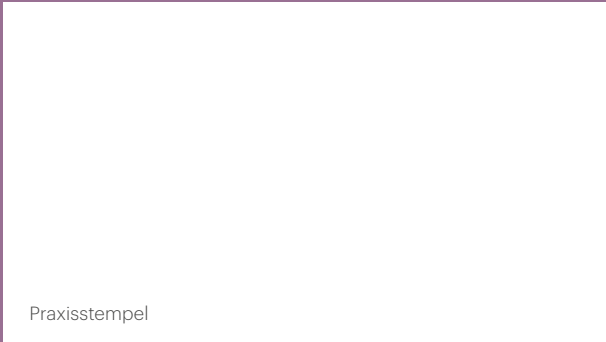

Praxisstempel